

货号： B08164

1/3



CD65-PB 检测试剂盒(流式细胞法)说明书

	规格
特异性	CD65
克隆	88H7
杂交瘤	MOPC 315 × balb/c
免疫原	HL60 早幼粒细胞系
同型对照	IgM
种属	小鼠
纯化	凝胶过滤
荧光染料	Pacific Blue
摩尔比	Pacific Blue / Ig: 17-21
λ 激发	405 nm
发射峰	455 nm
缓冲液	PBS pH 7.2 plus 2 mg / mL BSA 和 0.1% NaN ₃

REF B08164 液体 - 0.5 mL

分析物特异性试剂。

分析和性能特征未确定

【产品名称】

通用名称： CD65-PB 检测试剂盒(流式细胞法)

英文名称： CD65-Pacific Blue

【试剂】

浓度： 请登录 www.beckmancoulter.com 查看特定批次的检验报告。

【警告和注意事项】

- 本试剂含 0.1%叠氮钠。叠氮钠在酸性条件下会生成剧毒化合物-叠氮酸。丢弃时，应使用流动水冲洗叠氮化物。建议采取以上预防措施以免在金属管道中沉积（可能引起爆炸）。如果接触到皮肤或眼睛，请用水长时间清洗。
- 与本试剂接触的标本、样本和所有材料均应视为具有潜在传染性，应采取适当的预防措施进行处置。
- 切勿口吸移液，避免样本与皮肤和黏膜接触。
- 请勿使用已超过标签所示失效日期的抗体。
- 在储存或孵育过程中，请勿将试剂暴露于强光下。
- 避免试剂发生微生物污染，否则可能出现错误结果。
- 处理本试剂时，遵循药物非临床研究质量管理规范。
- 试剂物理外观的任何变化都可能表明试剂变质，此时不应使用试剂。

【GHS 危险等级分类】

未被归为危险品

SDS

化学品安全技术说明书提供于 beckman.com/techdocs

【储存、处理条件和稳定性】

本试剂在 2-8°C 下储存时可在有效期内保持稳定。切勿冷冻。

无需复溶。本单抗可直接从瓶中取出后使用。使用前使试剂达到 18-25°C。

【内容物】

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中形成易爆化合物。请参阅 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76) (美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[76/8/16])。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在丢弃未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮钠的丢弃必须符合当地的相关规定。

【特异性】

CD65 抗原类似于 CD15 抗体识别的碳水化合物结构。CD65 是一种 II 型链岩藻糖神经节苷脂，包括寡糖序列：Gal β 1-4GlcNac β 1-3Gal β 1-4GlcNac (Fuc α 1-3) β 1-R。粒细胞高度表达 CD65 抗原，而单核细胞呈弱 CD65 阳性^(1, 2)。88H7 单抗 (mAb) 已于 1989 年在奥地利维也纳举办的第 4 届人类白细胞分化抗原 (HLDA) 国际研讨会上进行研究⁽¹⁾，并于 1996 年在日本神户举办的第 6 届 HLDA 国际研讨会上归至 CD65 分化群⁽³⁾。

【商标】

Beckman Coulter、标志和 IOTest 是贝克曼库尔特 (美国) 股份有限公司的商标，已在 USPTO 注册。

Pacific Blue 为 Molecular Probes, Inc. 的商标。

【其他信息】

欲获得其他信息，或收到破损产品，请致电 400 821 8935 与贝克曼库尔特客户服务部联系，或联系当地贝克曼库尔特代表。

【符号说明】

符号词汇表发布于 beckman.com/techdocs (文件编号 B60062)

【说明书版本说明】

原文说明书文档版本：B59632AB，原文说明书生效日期：2019 年 09 月；

中文说明书文档版本：B59632AB-CN，中文说明书生效时间：2024 年 4 月；

中文说明书 B59632AB-CN 内容直接翻译自原文说明书 B59632AB。

【参考文献】

1. Stockinger, H., "Cluster report CDw65", 1989, Leucocyte Typing IV, White Cell Differentiation Antigens, W. Knapp, et al., Eds., Oxford University Press, 836- 838.
2. Knapp, W., Majdic, O., Blanchard, J.D., Chia, W., Feizi, T., Gyimesi, E., Hirabayashi, Y., Howard, C.J., Kniep, B., Thompson, J.S., Wiels, J., Wijdenes, J., "CDw65 cluster workshop report", 1995, Leucocyte

Typing V, White Cell Differentiation Antigens. Schlossman, S.F., et al., Eds., Oxford University Press, 876-882.

3. Kniep, B., Peter-Katalinic, J., Müthing, J., Majdic, O., Pickl, W.F., Knapp, W., "CD65/CD65s Workshop Panel report", 1997, Leucocyte Typing VI, White Cell Differentiation Antigens. Kishimoto, T., et al, Eds., Garland Publishing, Inc., 990-992.



免疫泰克有限公司 IMMUNOTECH S.A.S. (a Beckman Coulter Company) , 130, avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, 13276 Marseille cedex 9, France, 33-491 172 727