

货号：B19718

1/3



## CD64-PB 检测试剂盒(流式细胞法)说明书

	规格
特异性	CD64
克隆	22
杂交瘤	NS1 x balb/c
免疫原	人单核细胞
同型对照	IgG1
种属	小鼠
纯化	亲和层析
荧光染料	Pacific Blue
摩尔比	Pacific Blue / Ig: 6-8
$\lambda$ 激发	405 nm
发射峰	455 nm
缓冲液	PBS pH 7.2 plus 2 mg / mL BSA 和 0.1% NaN <sub>3</sub>

**REF** B19718 液体 - 0.5 mL

分析物特异性试剂。

分析和性能特征未确定

### 【产品名称】

通用名称：CD64-PB 检测试剂盒(流式细胞法)

英文名称：CD64-Pacific Blue

### 【试剂】

浓度：请登录 [www.beckmancoulter.com](http://www.beckmancoulter.com) 查看特定批次的检验报告。

### 【警告和注意事项】

- 本试剂含 0.1%叠氮钠。叠氮钠在酸性条件下会生成剧毒化合物-叠氮酸。丢弃时，应使用流动水冲洗叠氮化物。建议采取以上预防措施以免在金属管道中沉积（可能引起爆炸）。如果接触到皮肤或眼睛，请用水长时间清洗。
- 与本试剂接触的标本、样本和所有材料均应视为具有潜在传染性，应采取适当的预防措施进行处置。
- 切勿口吸移液，避免样本与皮肤和黏膜接触。
- 请勿使用已超过标签所示失效日期的抗体。
- 在储存或孵育过程中，请勿将试剂暴露于强光下。
- 避免试剂发生微生物污染，否则可能出现错误结果。

7. 处理本试剂时，遵循药物非临床研究质量管理规范。
8. 试剂物理外观的任何变化都可能表明试剂变质，此时不应使用试剂。

**【GHS 危险等级分类】**

未被归为危险品

SDS	化学品安全技术说明书提供于 <a href="http://beckman.com/techdocs">beckman.com/techdocs</a>
-----	--

**【储存、处理条件和稳定性】**

本试剂在 2-8°C 下储存时可在有效期内保持稳定。切勿冷冻。  
无需复溶。本单抗可直接从瓶中取出后使用。使用前使试剂达到 18-25°C。

**【内容物】**

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中形成易爆化合物。请参阅 NIOSH Bulletin: Explosive Azide Hazard (8/16/76) (美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[76/8/16])。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在丢弃未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮钠的丢弃必须符合当地的相关规定。

**【特异性】**

CD64 是一种称为 Fc 受体的整合膜糖蛋白，其以高亲和力结合单体 IgG 型抗体<sup>(1)</sup>。其也称为 Fc-γ 受体 1 (FcγRI) 或 FCRI。在结合 IgG 之后，CD64 与称为共同 γ 链的辅助链相互作用，从而触发细胞激活<sup>(2)</sup>。在结构上，CD64 由允许其转运到细胞表面的信号肽、用于结合抗体的 C2 型的三个胞外免疫球蛋白结构域、疏水性跨膜结构域和短胞质尾区构成<sup>(3)</sup>。

CD64 主要见于巨噬细胞和单核细胞。CD64 在早期骨髓细胞上和 IFNγ 及 G-CSF 激活的 PMN 中表达<sup>(3, 4)</sup>。22 单抗于 1989 年在奥地利维也纳举办的第 4 届人类白细胞分化抗原 (HLDA) 研讨会上归至 CD64 分化群 (WS 代码：96, M 部分)<sup>(5)</sup>。

**【商标】**

Beckman Coulter、标志以及文中提及的贝克曼库尔特产品和服务标记均是贝克曼库尔特（美国）股份有限公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。

**【其他信息】**

欲获得其他信息，或收到破损产品，请致电 400 821 8935 与贝克曼库尔特客户服务部联系，或联系当地贝克曼库尔特代表。

**【符号说明】**

符号词汇表发布于 [beckman.com/techdocs](http://beckman.com/techdocs) (文件编号 B60062)

**【说明书版本说明】**

原文说明书文档版本：B59688AC，原文说明书生效日期：2019 年 09 月；  
中文说明书文档版本：B59688AC-CN，中文说明书生效时间：2024 年 4 月；  
中文说明书 B59688AC-CN 内容直接翻译自原文说明书 B59688AC。

## 【参考文献】

1. Hulett M, Hogarth P "The second and third extracellular domains of FcγRI (CD64) confer the unique high affinity binding of IgG2a". *Mol Immunol* 35 (14-15): 989-96 1998.
2. Nimmerjahn F, Ravetch J (2006). "Fcγ receptors: old friends and new family members". *Immunity* 24 (1): 19-28.
3. Perussia B, Dayton E, Lazarus R, al. (1983). "Immune interferon induces the receptor for monomeric IgG1 on human monocytic and myeloid cells". *J Exp Med* 158 (4): 1092-113.
4. Repp R, Valerius T, Sendler A, Gramatzki M, Iro H, Kalden J, Platzer E (1991). "Neutrophils express the high affinity receptor for IgG (Fc γRI, CD64) after in vivo application of recombinant human granulocyte colony-stimulating factor". *Blood* 78 (4): 885-9.
5. Majdic, O., "Cluster report : CD64", 1989, *Leucocyte Typing IV,, White Cell Differentiation Antigens*. W. Knapp, et al., Eds., Oxford University Press, 835-836.



免疫泰克有限公司 IMMUNOTECH S.A.S. (a Beckman Coulter Company) , 130, avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, 13276 Marseille cedex 9, France, 33-491 172 727